

ALCOSCAN

AL7000

BRUGSVEJLEDNING (DK)

Alcoscan AL7000 måler alkohol i lungerne ved hjælp af en åndedrætsprøve. Målingen omregnes derefter til koncentrationen af alkohol i blodet (promille)

Sådan gør du...

1. Tænd på knappen midt på alkoholmeteret.
2. Vent indtil Alcoscan viser "blow" (se billede)
3. Blæs i mundstykket i ca. 4 sekunder indtil 2 bip lyder
4. Resultatet vises nu i promille i 15 sekunder. (0,1 = 1 promille)
5. Alcoscan slukker automatisk.



Vigtigt...

- a. Test først ca. 20 minutter efter indtagelse af mad og drikke. Alkohol i munden, kan påvirke målingen.
- b. Undgå at teste i kraftig blæst eller indelukkede lokaler. Dårlig ventilation kan desuden påvirke alkoholmeteret til at indstille (kalibrere) sig langsommere.
- c. Pust ikke røg eller lign. i Alcoscan, da det kan skade sensoren.
- d. Undgå ekstreme temperaturer og hold den uden for børns rækkevidde.

Display...



Står der **"FLOW"** i displayet, Har åndedræts-målingen ikke været kraftig nok. Foretag en ny måling.

Står der **"BAT"** i displayet, er batteriniveauet lavt. Skift straks batteri.

Står der **"CAL"** i displayet, har Alcoscan opnået over 300 tests. Efter 300 tests falder præcisionen. En udskiftning af sensor modulet vil genskærpe præcisionen.

Udskiftning af sensor modulet...

1. åben SENSOR låget
2. træk printet ud
3. isæt nyt print og luk låget

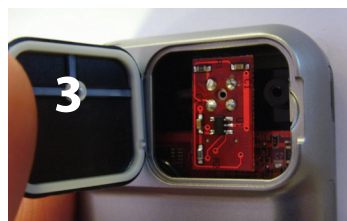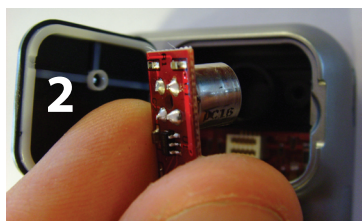

Ekstra...

ALCOSCAN indeholder udover alkoholmeter også en smart neopren transporttaske, 2 x AA batterier og 5 mundstykker.

2 stk mundstykker kan opbevares i batterirummet (se billede nr. 4)